

Handleiding voor het (her)gebruik van de Heat In A Click warmtezakken



Buig het muntje in de warmtezak, totdat er een 'klik' voelbaar is.



Leg de warmtezak op de lichaamsdelen die u verwarmd wilt hebben, of voor het doel waarvoor het bedoeld is.



Stop de warmtezak in een (gele) vaatdoek. Doe deze in een pan met water, en breng het water aan de kook. Laat het daarna nog 5 tot max.10 minuten koken. Zet het vuur uit en wacht min. 60 minuten voordat je de warmtezak uit het (hete) water haalt!



Als je de warmtezak hebt uitgekookt is de inhoud weer vloeibaar, en kan het muntje weer worden gebogen. Zo kan je keer op keer genieten van de heerlijke Heat In A Click warmtezakken!

Waarschuwing!

- Het product en de inhoud zijn niet giftig.
- De gel bevat Natriumacetaat.
- Bij lekkage: de gel uit de warmtezak niet inslikken en contact met de ogen vermijden.
- Bij huidcontact met de gel, goed afspoelen met zeep en warm water.

- Bij inslikken van de gel, onmiddellijk de mond uitspoelen met veel water. Indien nodig, raadpleeg een arts.
- Bij oogcontact met de gel, onmiddellijk het oog uitspoelen met veel water. (min. 15 minuten) Indien nodig, raadpleeg een arts.

- Het product kan direct na het uitkoken erg heet zijn!
- We adviseren om het product niet te gebruiken op gebieden met een zeer gevoelige huid.
- Gebruik door kinderen jonger dan 3 jaar is niet aanbevolen.
- Probeer nooit zelf een kapotte warmtezak te repareren.
- Gebruik geen scherpe voorwerpen in de buurt van de warmtezak.
- Verwarm de warmtezak nooit in een magnetron!

- Vermijd direct contact van de warmtezak met open vuur

Importeur:



Relaxxed
Kuyperstraat 9
3601 VE Maarssen
www.relaxxed.nl